

PSA - CERTUM[®]

Prueba Rápida Semi-Cuantitativa
para PSA (Sangre/Suero/Plasma)



ACERCA DE CERTUM®

Certum® Diagnostics tiene como objetivo cubrir con un alto grado de satisfacción las necesidades de Hospitales, Laboratorios, Instituciones de Gobierno y Clínicas, que buscan ofrecer un diagnóstico rápido y acertado.

ACERCA DE LA PRUEBA


La prueba del Antígeno Específico de la Próstata es la herramienta más valiosa disponible para el diagnóstico de cáncer de próstata temprano. Muchos estudios han confirmado que la presencia de PSA es el indicador tumoral más útil y significativo conocido para el cáncer de próstata y la infección de la próstata de la Hiperplasia Prostática Benigna (HPB).

El Dispositivo de Prueba Rápida Semi-Cuantitativa para PSA (Sangre/Suero/Plasma) utiliza una combinación de anticuerpos conjugados de oro coloidal y anti-PSA para detectar selectivamente el PSA total en sangre, suero o plasma. La prueba tiene un valor de corte de 3 ng/ml y un valor de referencia de 10 ng/ml.



MODO DE EMPLEO


- 1 Permita que el sobre alcance temperatura ambiente antes de abrirlo.

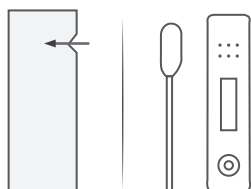


- 2 **Para las muestras de Sangre por Venopunción, Suero o Plasma:** 1 gota de suero o plasma (aproximadamente 40 µ L) ó 2 gotas de sangre por venopunción (aproximadamente 80 µ L) al pozo de muestra(S) del dispositivo de prueba.

Para muestra de Punción en el dedo: Llene el tubo capilar y transfiera aproximadamente 80 µ L de la muestra sangre del dedo al área de la muestra del dispositivo (S).

- 3 Añada 1 gota del buffer en el pocillo de muestra.

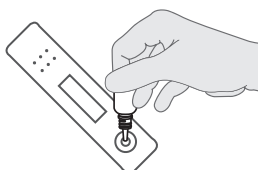

- 4 Espere que aparezcan las líneas teñidas. Lea los resultados a los 5 minutos. No interprete los resultados después de 10 minutos.

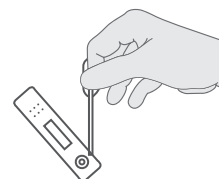

VENTAJAS Y BENEFICIOS


- Prueba rápida, económica y fácil de utilizar.
- Alta sensibilidad y especificidad.
- No requiere equipo de laboratorio adicional.
- Cuenta con aprobación de SSA.
- Almacenamiento 2° a 30° (refrigeración o temperatura ambiente)

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Positivo: Aparecen 3 líneas tanto en la línea de prueba (T) como la línea de control (C) y en la línea de referencia (R) lo cual indica un resultado positivo.

Negativo: Una línea roja aparece en la región de control (C) y otra en la región de la línea de referencia (R). No aparece ninguna línea en la zona de la prueba (T). Esto indica que los niveles de PSA se encuentran por debajo de los 3 ng/ml.

Inválido: Las líneas de control y/o de referencia no aparecen. Volumen de muestra insuficiente o incorrecta son las razones más frecuentes del fallo de la línea de control. Revise el procedimiento y repita la prueba con una nueva prueba. Si el problema persiste, deje de usar la prueba inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor local.

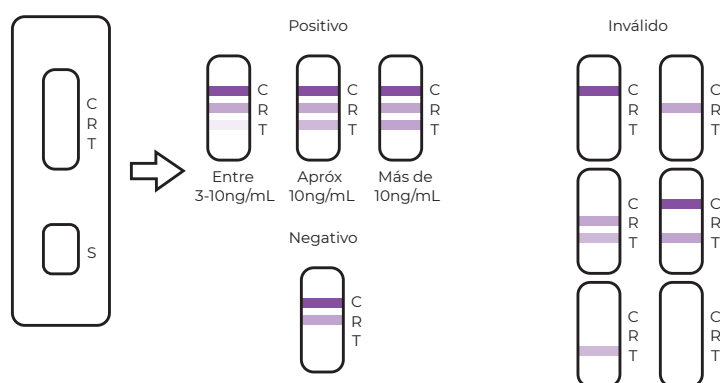

CARACTERÍSTICAS

Catálogo	Producto	Espécimen	Formato	Presentación
3501R097	Antígeno Específico de Próstata (PSA)	Suero /Plasma/ Sangre Entera	Cassette	Caja con 25

- Información exclusiva para profesionales de la salud, empresas, hospitales y/o clínicas.
- Material desarrollado por DIAGNOSE REACTIVOS
- Queda prohibida la reproducción parcial o total del material.
- El producto es fabricado por terceros y DIAGNOSE REACTIVOS actúa sólo como intermediario.