



ANIVERSARIO

DIAGNOSE[®]

LABORATORIO CLÍNICO • EMPRESARIAL

BROCHURE IBLOW

Tecnología de muestreo rápido para detectar alcohol en sangre a través de una prueba de aliento

El Alcoholímetro más rápido del mercado,
diseñado para instituciones con tolerancia
cero al alcohol.

SENTECH 

ibLOW 10



ALCOHOLÍMETRO IBLOW 10

Tecnología de muestreo rápido para detectar alcohol en sangre a través de una prueba de aliento

ACERCA DE SENTECH KOREA CORP.

El Alcoholímetro iBlow 10 es un equipo con sensor de celda de combustible para la rápida detección de alcohol en la sangre a través de muestras de aliento. Ofrece Modo Activo y Pasivo sin requerir boquillas.


Por su diseño robusto, modo de empleo ágil y facilidad de uso, iBlow 10 es el equipo ideal para Centros de Trabajo que buscan disminuir los riesgos de accidentes, así como operativos móviles de pruebas a Automovilistas. En la vía pública como prueba de tamizaje previa a un dictamen.

CARACTERÍSTICAS

- Sensor de Alta Tecnología Suracell (Celda de Combustión)
- Capaz de realizar 12 pruebas por minuto
- No requiere Boquillas
- Incluye tapa lavable para facilitar limpieza
- No requiere calibración hasta llegar a 10,000 muestras o 1 año, lo que suceda primero
- Recordatorio de Calibración programable
- Opera con 6 baterías AA (Incluidas)
- Alertas LED (Rojo en caso de pruebas positivas / Verde en Negativas) Como luz indicadora de alto alcance
- Permite muestreos pasivos o activos
- Modos de prueba, opción de auto-apagado e indicaciones ajustables desde el menú del equipo
- Resultados Cuantitativos o Cualitativos según se prefiera
- Incluye imán que permite adherirse a vehículos
- Función audible y visual indica un cambio de estado
- Amplia temperatura de operación (-5°C a 55°C)


MODO DE EMPLEO

MODO PRUEBA ACTIVO (AUTOMÁTICO)

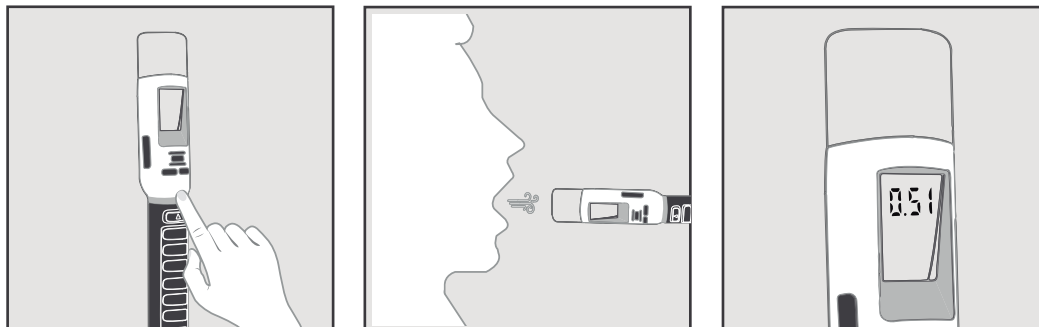

Coloque el equipo 10 cm de la boca del sujeto. Indique al sujeto soplar hacia la unidad. La prueba se activará automáticamente y el resultado aparecerá en 2 segundos. Lea el resultado cualitativo.

MODO PRUEBA MANUAL (PASIVO)

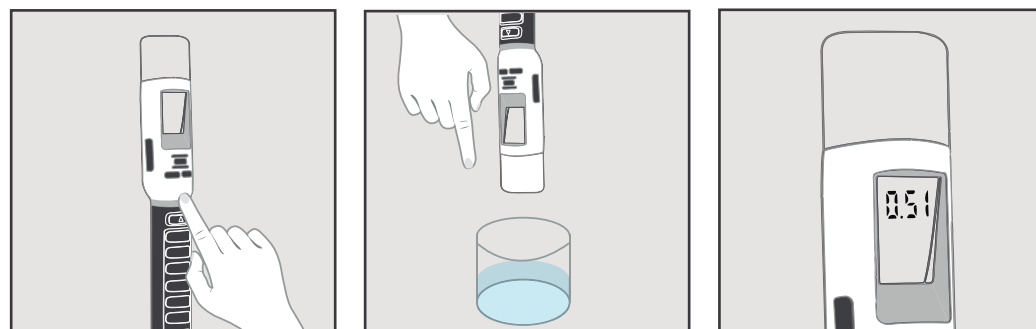

La modalidad Pasiva de iBlow permite además hacer pruebas para verificar si existe presencia de alcohol en envases o lugares cerrados o bien para personas inconscientes o incapaces de brindar una muestra de aliento suficiente. Para ello, tan solo es necesario activar la modalidad “GO” desde el botón principal.

NOMBRE DE PIEZAS



NUEVA EXTENSIÓN PARA EL ALCOHOLÍMETRO SENTECH IBLOW10

El accesorio ideal para realizar pruebas a distancia



MATERIAL

Plástico Acetal (DELTRIN®) Aprobado por la FDA para contacto con los alimentos, base de aluminio con opresor en acero inoxidable y mango ergonómico. Con esta nueva herramienta evite el riesgo de contagios así como la ventaja de realizar pruebas a más de 1 mt 20 de distancia.



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Catálogo	Producto	Contenido
3501EQ09	Alcoholímetro iBlow10	1 Equipo
Extension-iblow10	Accesorio Alcoholímetro iBlow10	1 Extensión

- Información exclusiva para profesionales de la salud, empresas, hospitales y/o clínicas.
- Material desarrollado por DIAGNOSE REACTIVOS
- Queda prohibida la reproducción parcial o total del material.
- El producto es fabricado por terceros y DIAGNOSE REACTIVOS actúa sólo como intermediario.