



DIAGNOSE
LABORATORIO CLÍNICO • EMPRESARIAL

PRUEBA DE EMBARAZO CERTUM

en 3 diferentes formatos:
Aplicador, Cassette y Tira

CERTUM
HOMETEST



ACERCA DE LA PRUEBA

Las pruebas de embarazo **Certum** son la mejor alternativa para laboratorios de análisis clínicos y consultorios médicos, al ofrecer un alto nivel de sensibilidad y especificidad.

En tres diferentes formatos: Aplicador, cassette y tira. Además de brindar resultados de fácil interpretación en menos de 5 minutos.

BENEFICIOS

- Método fácil de realizar.
- Alta especificidad y sensibilidad.
- Tiempo de resultados rápidos.
- No requiere equipo Adicional de laboratorio



CARACTERÍSTICAS



Método fácil y práctico



Confiable




Resultados rápidos



Fácil del utilizar

MODO DE USO APLICADOR


- 1 Retire el dispositivo de la envoltura y destape antes de hacer la prueba.

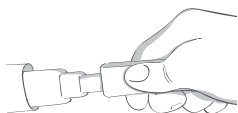


- 2 Sujete el mango y coloque la almohadilla absorbente del dispositivo en el chorro de orina durante 10 segundos.




- 3 Vuelva a poner la tapa y coloque el dispositivo en una superficie plana con la ventana de resultados hacia arriba.

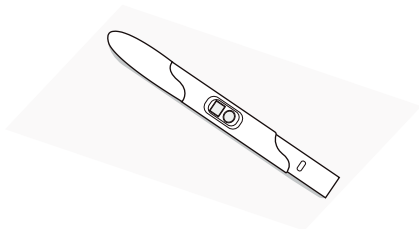


- 4 Espere de 3 a 7 minutos para leer los resultados. No interprete los resultados como definitivos hasta después de 10 minutos.

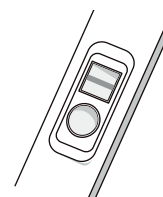


INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS APLICADOR

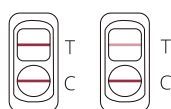

Positivo

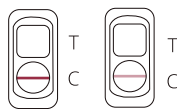


Negativo

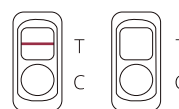

Inválido

MODO DE USO CASSETTE

- 1 Utilice el gotero (incluido) para recolectar la muestra de orina, y aplique todo el contenido en la ranura de muestra.

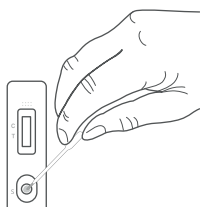

- 2 Lea el resultado después de 3-7 minutos.




INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS CASSETTE




MODO DE USO TIRA

- 1 Introduzca la prueba en una muestra de orina de 5 a 10 segundos.
- 2 Retire la prueba y colóquela en una superficie plana.
- 3 Lea el resultado después de 3-7 minutos.

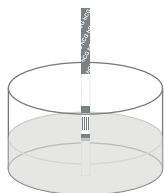

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS TIRAS

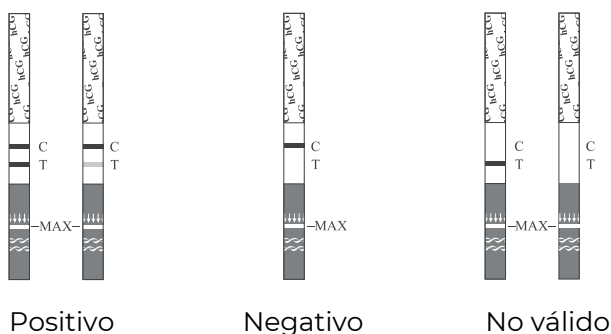

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Catálogo	Producto/Parámetro	Formato	Espécimen
3501RU042	hCG(Embarazo)	Aplicador	Orina
3501R039	hCG(Embarazo)	Cassette	Orina
3501R042	hCG(Embarazo)	Tira	Orina

- Información exclusiva para profesionales de la salud, empresas, hospitales y/o clínicas.
- Material desarrollado por DIAGNOSE REACTIVOS
- Queda prohibida la reproducción parcial o total del material.
- El producto es fabricado por terceros y DIAGNOSE REACTIVOS actúa sólo como intermediario.