

CHAGAS - CERTUM®

Prueba rápida para la detección de
IgG anti-Trypanosoma cruzi (T. cruzi)
en sangre entera, suero o plasma.



ACERCA DE CERTUM®

Certum® Diagnostics tiene como objetivo cubrir con un alto grado de satisfacción las necesidades de Hospitales, Laboratorios, Instituciones de Gobierno y Clínicas, que buscan ofrecer un diagnóstico rápido y acertado.




ACERCA DE LA PRUEBA


La prueba rápida de Chagas en cassette (sangre entera/- suero/plasma) es un inmunoensayo cualitativo basado en membrana para la detección de IgG anti-Trypanosoma cruzi (T. cruzi) en sangre entera, suero o plasma. La membrana se pre-recubre con un anticuerpo recombinante de ratón anti-IgG humana en la región de línea de prueba del casete. Durante la prueba, las muestras de sangre entera, suero o plasma reaccionan con el antígeno Chagas recombinante conjugado con oro coloidal.

MODO DE EMPLEO


- 1 Permita que el sobre alcance temperatura ambiente antes de abrirlo.

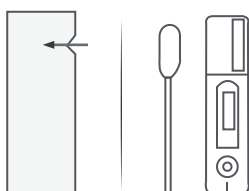

- 2 **Suero o Plasma:** Añada 25µl (1 gota) de la muestra de suero/plasma al pocillo de muestra
Sangre Entera: Añada 50µl (2 gota) de la muestra de sangre entera al pocillo de muestra

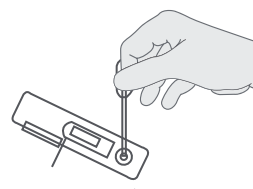

- 1 Añada 80µl o 2-3 gotas del buffer en el pocillo de muestra.

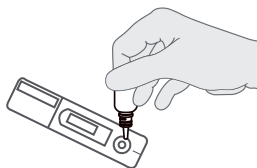

- 2 Espere que aparezcan las líneas teñidas. Lea los resultados a los 15 minutos. No interprete los resultados después de 20 minutos.



VENTAJAS Y BENEFICIOS


- Prueba eficiente, rápida, económica y fácil de utilizar.
- Alta sensibilidad y especificidad.
- No requiere equipo de laboratorio adicional.
- Cuenta con aprobación de SSA.
- No requiere refrigeración.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Positivo: Aparecen dos líneas color púrpura tanto en la línea de prueba (T) como la línea de control (C) lo cual indica un resultado positivo.

Negativo: Solo aparece una línea de color en la línea de control (C) lo que indica un resultado negativo.

Inválido: Si no aparecen líneas color púrpura en la línea de control (C) esto indica un proceso de ensayo incorrecto o falla del kit. Lea atentamente las instrucciones y repita la prueba con un nuevo kit. Si el problema persiste, deberá inmediatamente dejar de usar los kits con el mismo No. de Lote y contactar a su proveedor local.

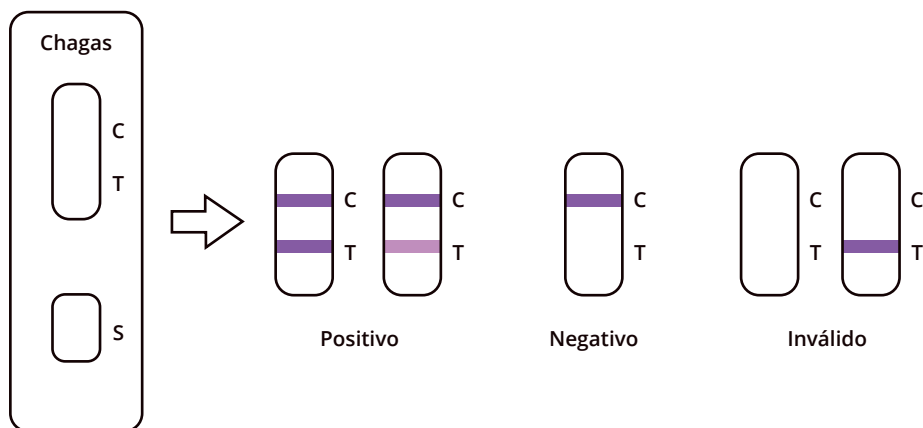

CARACTERÍSTICAS

Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Presentación
3501R074	Chagas	Suero /Plasma/Sangre	Cassette	Caja con 40

- Información exclusiva para profesionales de la salud, empresas, hospitales y/o clínicas.
- Material desarrollado por DIAGNOSE REACTIVOS
- Queda prohibida la reproducción parcial o total del material.
- El producto es fabricado por terceros y DIAGNOSE REACTIVOS actúa sólo como intermediario.