



ANIVERSARIO

DIAGNOSE[®]

LABORATORIO CLÍNICO + EMPRESARIAL

PRUEBA DE EMBARAZO INSTANT-VIEW

Prueba de embarazo en 3 diferentes formatos:
Aplicador, Cassette y Tira



ACERCA DE INSTANT-VIEW

La marca Instant-View es sinónimo de alta calidad y prestigio. Usted puede confiar en Instant-View ya que es un producto fabricado en los Estados Unidos por Alfa Scientific Designs, Inc. empresa que mantiene la certificación ISO 13485 para los fabricantes de dispositivos médicos y cada examen ha sido certificado por la FDA y la Comunidad Europea



PRUEBA DE EMBARAZO INSTANT-VIEW

Detecte Hormonas hCG en tiras individuales, cassettes y aplicador. Esta prueba de embarazo se basa en la detección de la Gonadotropina Coriónica Humana (hCG) en orina y suero. hCG es una hormona producida por la placenta. En personas normales, el hCG provee una indicación temprana de embarazo.

La Prueba de Embarazo Combo utiliza un anticuerpo monoclonal de ratón específico al hCG en un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral en un paso para detectar hCG en el nivel cercano o mayor a 25 mIU/ml (WHO 3rd IS 75/537).



CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA



Método Fácil
y Práctico



Resultados
Rápidos



Confiable




Fácil de
Utilizar

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- **Sensibilidad:** La Prueba de Embarazo Instant-View desplegarán resultados positivos con especímenes que contengan hCG en un nivel cercano o mayor a 25 mIU/ml. La prueba esta estandarizada al WHO 3rd IS 75/537
- **Precisión:** La prueba de embarazo Instant-View fue evaluada en 3 Laboratorios Médicos de Oficio por personas con perfiles educativos y experiencias de trabajo diferentes. Los resultados fueron iguales para los 3 laboratorios en un 100%
- **Especificidad:** La sub-unidad de hTSH, hLH, y hFSH es similar a aquella de hCG, lo cual puede causar cros-reactividad entre dichas hormonas. Concentraciones fisiológicas altas de TSH (hasta 1,000 μ IU/ml), hLH (hasta 300 mIU/ml), y hFSH (hasta 1,000 mIU/ml) rociada en hCG positiva (rociada con 25 mIU/ml) y especímenes negativos fueron probados por separado con la prueba de embarazo Instant-View y no afectaron los resultados esperados de dicho estudio.

MODO DE EMPLEO APLICADOR


- 1 Retire el dispositivo de la envoltura y destape antes de hacer la prueba.

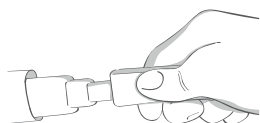


- 2 Sujete el mango y coloque la almohadilla absorbente del dispositivo en el chorro de orina durante 10 segundos.



- 3 Vuelva a poner la tapa y coloque el dispositivo en una superficie plana con la ventana de resultados hacia arriba.

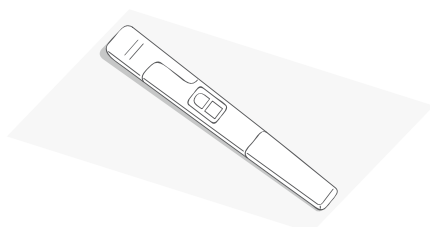


- 4 Espere de 3 a 7 minutos para leer los resultados. No interprete los resultados como definitivos hasta después de 10 minutos.

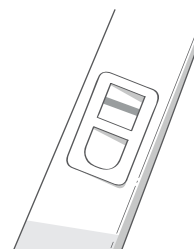

MODO DE EMPLEO CASSETTE

- 1 Utilice el gotero (incluido) para recolectar la muestra de orina, y aplique todo el contenido en la ranura de muestra.

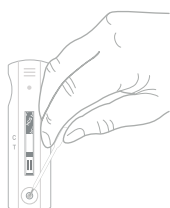


- 2 Lea el resultado después de 3-7 minutos.



5 minutos

- 1 Introduzca la prueba en una muestra de orina de 5 a 10 segundos.

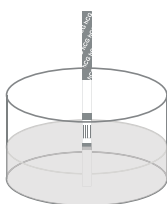

- 2 Retire la prueba y colóquela en una superficie plana.



- 3 Lea el resultado después de 3-7 minutos



5 minutos

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Catálogo	Producto/Parámetro	Formato	Espécimen
02-2487	hCG(Embarazo)	Tira	Orina
02-2486	hCG(Embarazo)	Cassette	Orina
02-2450	hCG(Embarazo)	Aplicador	Orina
02-2487	hCG(Embarazo)	Tira	Orina/Suero
02-248	hCG(Embarazo)	Cassette	Orina/Suero

- Información exclusiva para profesionales de la salud, empresas, hospitales y/o clínicas.
- Material desarrollado por DIAGNOSE REACTIVOS
- Queda prohibida la reproducción parcial o total del material.
- El producto es fabricado por terceros y DIAGNOSE REACTIVOS actúa sólo como intermediario.