



DIAGNOSE®
LABORATORIO CLÍNICO • EMPRESARIAL

HEPATITIS A (HAV)

Una prueba rápida para la detección en
un paso de anticuerpos IgM a Hepatitis A
en suero/plasma



ACERCA DE CERTUM

CERTUM es una marca que ofrece una amplia gama de kits de pruebas de diagnóstico innovadores que ayudan a brindar respuestas a los profesionales de la salud.

Los productos **CERTUM** ofrecen precisión, simplicidad y velocidad para el diagnóstico temprano y el monitoreo de afecciones médicas comunes, incluyendo pruebas para la detección de drogas de abuso, embarazo, marcadores cardíacos, marcadores tumorales y pruebas de enfermedades infecciosas entre otros. Los productos de diagnóstico **CERTUM** se usan fuera del cuerpo humano y requieren poco o ningún equipo especial.

CERTUM tiene como misión mejorar el bienestar del paciente, reduciendo los costos y tiempos totales de los resultados de exámenes de diagnóstico, manteniendo la calidad y estándares altos esperados por los profesionales de la salud.

CERTUM tiene una participación de mercado importante en hospitales, laboratorios de referencia, centros de investigación, consultorios médicos, servicios de salud ocupacional y programas de salud pública debido a su precisión, asequibilidad y facilidad de uso.



CERTUM es una línea de dispositivos de *pruebas rápidas* que ofrece un menú amplio de diagnósticos manufacturados con la mayor calidad y a un precio competitivo.




ACERCA DE LA PRUEBA


La prueba en un paso para hav IgM es un rápido ensayo inmunocromatográfico para la detección cualitativa de anticuerpos IgM contra el virus de la Hepatitis A (hav) en muestras de Suero/Plasma como apoyo en el diagnóstico del Virus de la Hepatitis A.




MODO DE EMPLEO

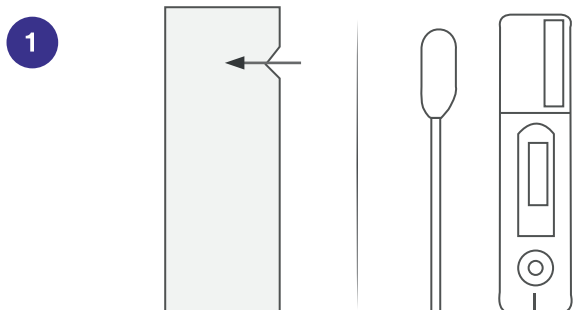

Permita que el sobre alcance temperatura ambiente antes de abrirlo.

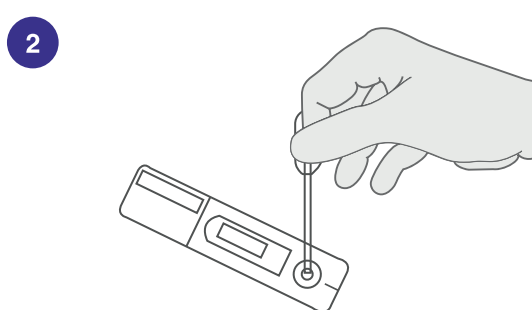

Añada 10 µl de la muestra de suero/plasma al pocillo de muestra.

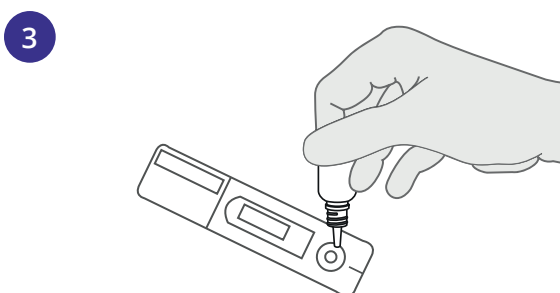

Añada 100µl o 2-3 gotas del buffer en el pocillo de muestra.





Espera que aparezcan las líneas teñidas.
Lea los resultados a los 15 minutos.
No interprete los resultados después de 20 minutos.


INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Positivo: Aparecen dos líneas color púrpura tanto en la línea de prueba (T) como la línea de control (C) lo cual indica un resultado positivo.

Negativo: Solo aparece una línea de color en la línea de control (C) lo que indica un resultado negativo.

Inválido: Si no aparecen líneas color púrpura en la línea de control (C) esto indica un proceso de ensayo incorrecto o falla del kit. Lea atentamente las instrucciones y repita la prueba con un nuevo kit. Si el problema persiste, deberá inmediatamente dejar de usar los kits con el mismo No. de Lote y contactar a su proveedor local.

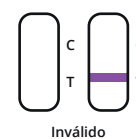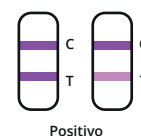

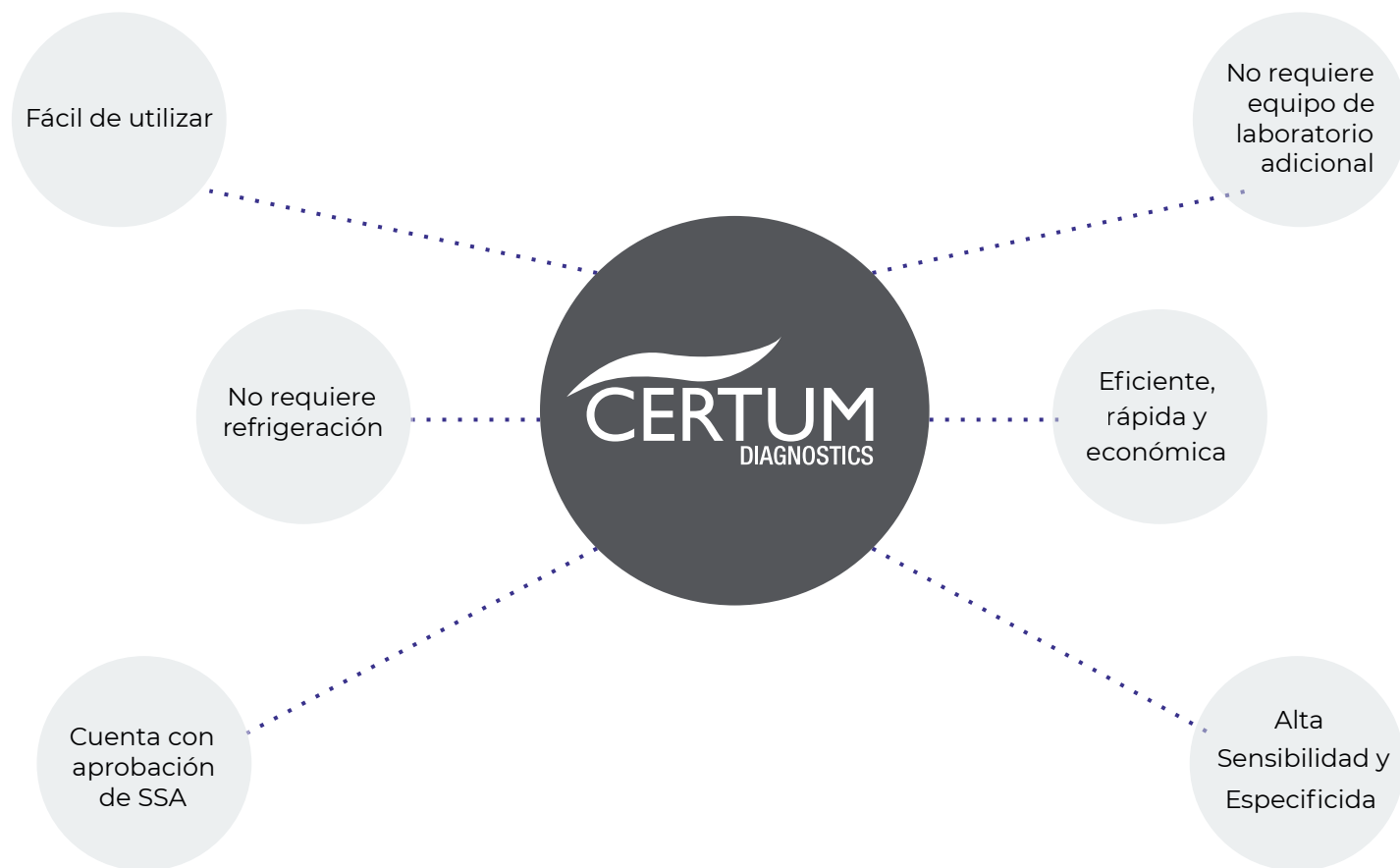

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Catálogo	Producto	Espécimen	Formato	Presentación
3501R073	Hepatitis A (HAV)	Suero /Plasma	Cassette	Caja con 25

- Información exclusiva para profesionales de la salud, empresas, hospitales y/o clínicas.
- Material desarrollado por DIAGNOSE REACTIVOS
- Queda prohibida la reproducción parcial o total del material.
- El producto es fabricado por terceros y DIAGNOSE REACTIVOS actúa sólo como intermediario.

Registro sanitario: 0437R2017 SS