



DIAGNOSE®
LABORATORIO CLÍNICO • EMPRESARIAL

HEPATITIS C

Prueba rápida para la detección cualitativa
de anticuerpos del virus de la Hepatitis C
en sangre entera, suero o plasma.



ACERCA DE CERTUM

CERTUM es una marca que ofrece una amplia gama de kits de pruebas de diagnóstico innovadores que ayudan a brindar respuestas a los profesionales de la salud.

Los productos **CERTUM** ofrecen precisión, simplicidad y velocidad para el diagnóstico temprano y el monitoreo de afecciones médicas comunes, incluyendo pruebas para la detección de drogas de abuso, embarazo, marcadores cardíacos, marcadores tumorales y pruebas de enfermedades infecciosas entre otros. Los productos de diagnóstico **CERTUM** se usan fuera del cuerpo humano y requieren poco o ningún equipo especial.

CERTUM tiene como misión mejorar el bienestar del paciente, reduciendo los costos y tiempos totales de los resultados de exámenes de diagnóstico, manteniendo la calidad y estándares altos esperados por los profesionales de la salud.

CERTUM tiene una participación de mercado importante en hospitales, laboratorios de referencia, centros de investigación, consultorios médicos, servicios de salud ocupacional y programas de salud pública debido a su precisión, asequibilidad y facilidad de uso.



CERTUM es una línea de dispositivos de *pruebas rápidas* que ofrece un menú amplio de diagnósticos manufacturados con la mayor calidad y a un precio competitivo.



ACERCA DE LA PRUEBA


La Prueba Rápida en Cassette de VHC (Sangre Entera / Suero / Plasma) es un inmunoensayo cualitativo, basado en una membrana para la detección del anticuerpo VHC en sangre entera, suero o plasma.

La membrana está pre-recubierta con antígeno VHC en la región de la línea de prueba del cassette.




MODO DE EMPLEO

1

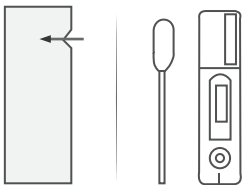


Permita que el sobre alcance temperatura ambiente antes de abrirlo.

2

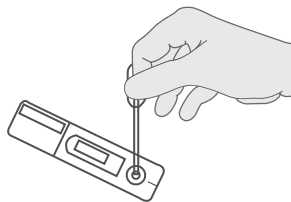


Añada 1 gota de la muestra de suero/plasma al pocillo y 2 gotas de buffer.

3

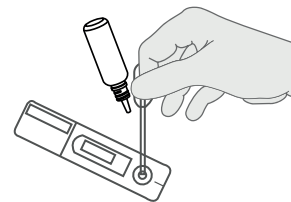


Añada 2 gotas de sangre entera capilar por venopunción y 2 gotas del buffer

4

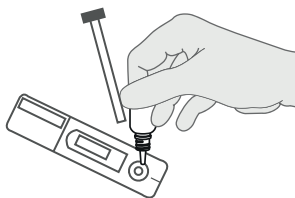

50 µl de sangre entera capilar por venopunción y 2 gotas de buffer.

5

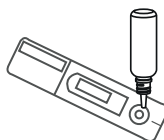

2 gotas de sangre entera capilar por venopunción y 2 gotas del buffer.


6



Lea resultados a los 15 minutos. No interprete los resultados después de 30 minutos.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Positivo: Aparecen dos líneas de color distintas. Una línea de color debe estar en la región de control (C) y la otra debe estar en la región de prueba.

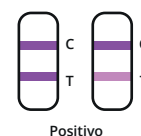


Positivo

Negativo: Una línea de color aparece en la región de control (C) . No hay ninguna línea roja o rosa aparente en la región de prueba (T)




Negativo

Inválido: La línea de control no aparece. El volumen de muestra insuficiente o las técnicas de procedimiento incorrectas son las razones más probables del fallo de la línea de control. Revise el procedimiento y repita la prueba con un nuevo cassette. Si el problema persiste, deje de usar el kit de prueba inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor local.

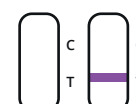

Inválido

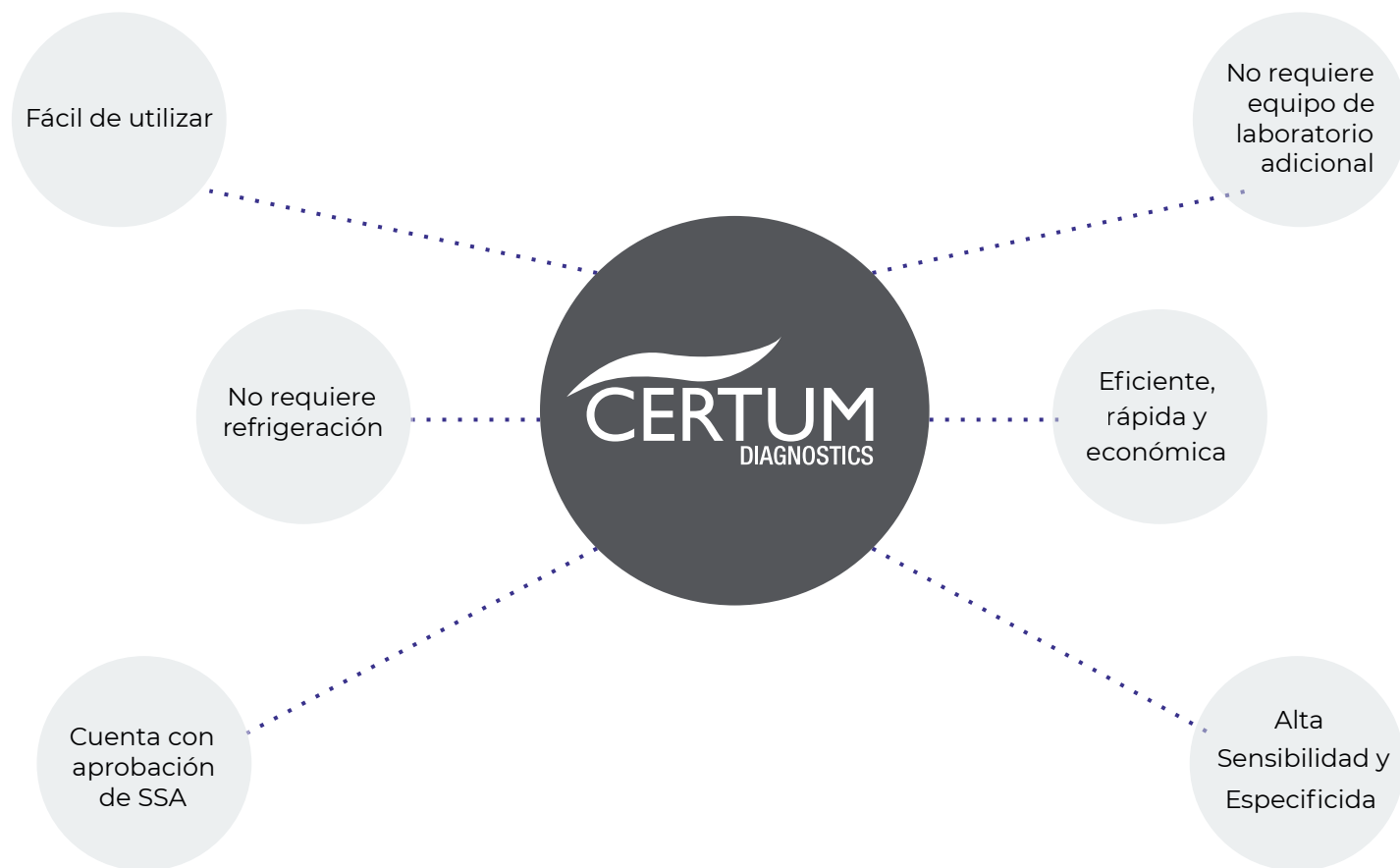

Registro sanitario: 0985R2021 SSA

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Catálogo	Producto	Espécimen	Formato	Presentación
3501R045	Hepatitis C (HCV)	Sangre entera / Suero / Plasma	Cassette	Caja con 25

- Información exclusiva para profesionales de la salud, empresas, hospitales y/o clínicas.
- Material desarrollado por DIAGNOSE REACTIVOS
- Queda prohibida la reproducción parcial o total del material.
- El producto es fabricado por terceros y DIAGNOSE REACTIVOS actúa sólo como intermediario.