


PANEL DE DROGAS INSTANT-VIEW

Prueba para detectar múltiples drogas
en una sola muestra de orina



PANEL DE DROGAS INSTANT-VIEW

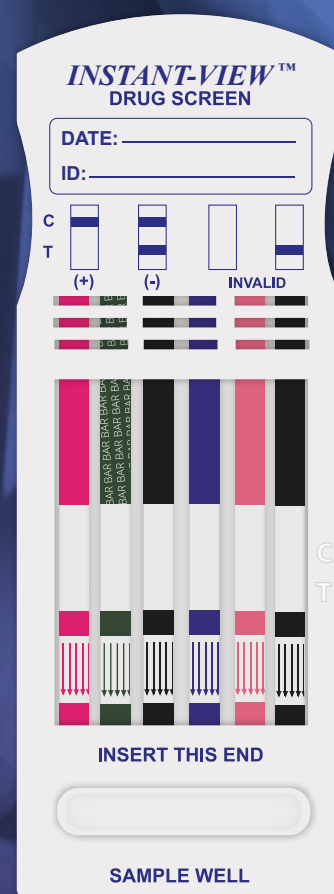


El Panel de Drogas en Orina Instant-View es un inmunoensayo cualitativo para detectar la presencia desde 2 y hasta 12 diferentes drogas y/o sus metabolitos en orina humana de acuerdo a puntos de corte específicos, en un solo ensayo.

Existen diferentes presentaciones que varían de acuerdo a la cantidad y tipos de parámetros (drogas) capaces de detectar.


Características

- Método fácil y práctico
- Resultados rápidos de entre 4 a 7 min
- Almacenar a temperatura ambiente (15° a 30° C)
- Más de 24 combinaciones de diferentes drogas disponibles
- Detecta de 2 hasta 12 diferentes drogas en una misma muestra de orina


MODO DE EMPLEO

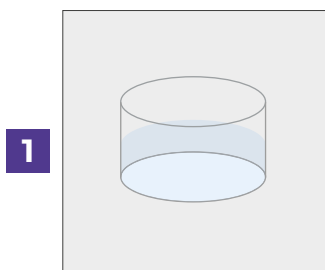

Recolecte una muestra de orina considerable de la persona.

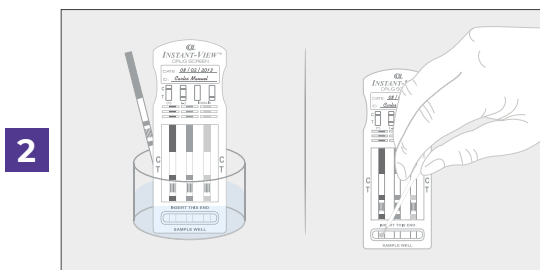

Inmerse la prueba de su elección en la muestra de orina por lo menos 10 segundos y después coloque la prueba en un trapo a secarse. O si lo prefiere, utilice un gotero para recolectar la muestra y aplique al menos 5 gotas a cada tira hasta mojarlas bien.

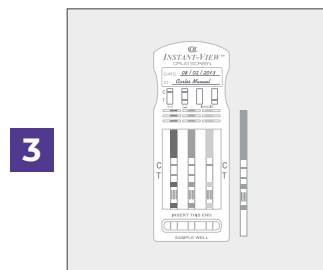

La presentación de resultados se da en un plazo de 4 a 7 minutos


INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS



Si la línea C aparece y no hay línea T, el examen indica un resultado positivo para aquella droga en particular. Muestras con resultados positivos deben confirmarse con un método más específico antes de una determinación positiva.



Si una línea C y una línea T aparecen, la prueba indica que el nivel correspondiente a la droga o sus metabolitos es inferior del punto de corte.

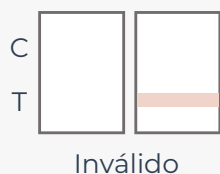

Si no se desarrolla una línea C dentro de 5 minutos en cualquiera de las tiras reactivas, el ensayo es inválido y en este caso habrá que repetir el examen con un dispositivo nuevo.

PARÁMETROS DISPONIBLES

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| - Anfetamina (AMP) | - Fenciclidina (PCP) |
| - Barbitúricos (BAR) | - Propoxifeno (PPX) |
| - Benzodiacepinas (BZD) | - Oxicodona (OXY) |
| - Cocaína (COC) | - Antidepresivos Tricíclicos (TCA) |
| - Marihuana (THC) | - MDMA (XTC) |
| - Morfina (Opiáceos) (OPI) | - Metadona (MTD) |
| - Ketamina | - Metanfetamina (MET) |

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Catálogo		Presentación	Contenido
3501R006	3	COC/THC/AMP	
3501R054	4	COC/THC/AMP/MET	
3501R017	5	COC/THC/AMP/MET/MOR	
3501R024	5	COC/THC/AMP/BZD/BAR	
3501R007	6	COC/THC/AMP/MET/MOR/BZD	 x25
3501R038	6	COC/THC/AMP/MET/BZD/BAR	
3503R007	6	COC/THC/AMP/MET/MOR/PCP	
3501RC040	7	COC/THC/AMP/MET/BAR/BZD/MOR	
3501R018	8	COC/THC/AMP/MET/MOR/BZD/BAR/PCP	
3501R043	10	COC/THC/AMP/MET/MOR/BZD/BAR/PCP/MTD/TCA	
3501R016	12	COC/THC/AMP/MET/BAR/BZO/MOR/PCP/MTD/TCA/PPX/XTC	

- Información exclusiva para profesionales de la salud, empresas, hospitales y/o clínicas.
- Material desarrollado por DIAGNOSE REACTIVOS
- Queda prohibida la reproducción parcial o total del material.
- El producto es fabricado por terceros y DIAGNOSE REACTIVOS actúa sólo como intermediario.