


# PRUEBA RÁPIDA DE CHIKUNGUNYA IGG/IGM

Inmunoensayo cualitativo  
basado en membranas para la  
detección de anticuerpos IgG e  
IgM contra Chikungunya.

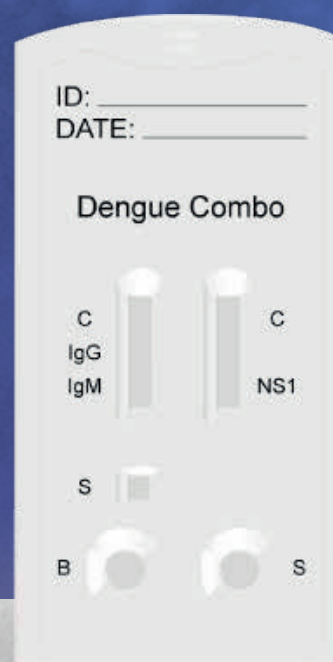

# PRUEBA RÁPIDA DE CHIKUNGUNYA IGG/IGM

Para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra Chikungunya en muestras humanas de sangre entera, suero o plasma.

## ACERCA DE CERTUM

CERTUM es una marca que ofrece una amplia gama de kits de pruebas de diagnóstico innovadores que ayudan a brindar respuestas a los profesionales de la salud. Los productos CERTUM ofrecen precisión, simplicidad y velocidad para el diagnóstico temprano y el monitoreo de afecciones médicas comunes, incluyendo pruebas para la detección de drogas de abuso, embarazo, marcadores cardíacos, marcadores tumorales y pruebas de enfermedades infecciosas entre otros. Los productos de diagnóstico CERTUM se usan fuera del cuerpo humano y requieren poco o ningún equipo especial.

CERTUM tiene como misión mejorar el bienestar del paciente, reduciendo los costos y tiempos totales de los resultados de exámenes de diagnóstico, manteniendo la calidad y estándares altos esperados por los profesionales de la salud. CERTUM tiene una participación de mercado importante en hospitales, laboratorios de referencia, centros de investigación, consultorios médicos, servicios de salud ocupacional y programas de salud pública debido a su precisión, asequibilidad y facilidad de uso.

## ACERCA DE LA PRUEBA


La prueba Chikungunya IgG/IgM Rapid Test Cassette (Sangre entera/Suero/Plasma) es un rápido inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra Chikungunya en muestras humanas de sangre entera, suero o plasma.

## BENEFICIOS

- Prueba eficiente, rápida, económica y fácil de utilizar.
- Alta sensibilidad y especificidad.
- No requiere equipo de laboratorio adicional.
- Cuenta con aprobación de SSA.
- No requiere refrigeración.



## MODO DE EMPLEO

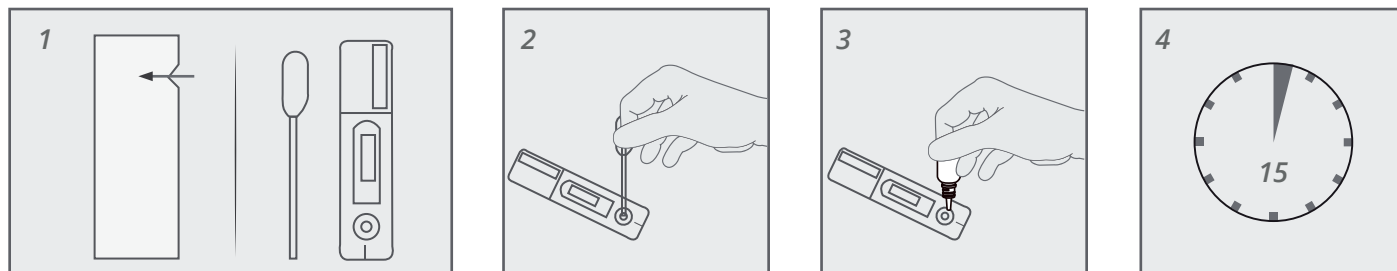

- 1.- Permita que el sobre alcance la temperatura ambiente antes de abrirlo.
- 2.- Suero o Plasma: Añada 25µl (1 gota) de la muestra de suero/plasma al pocillo de muestra.  
Sangre Entera: Añada 50µl (2 gotas) de la muestra de sangre entera al pocillo de muestra.
- 3.- Añada 80µl o 2-3 gotas del buffer en el pocillo de muestra.
- 4.- Espere que aparezcan las líneas teñidas. Lea los resultados a los 15 minutos. No interprete los resultados después de 20 minutos.

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Registro sanitario: 0761R2019 RSSA

| Catálogo | Producto                                              | Espécimen            | Contenido |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| ICHI-402 | Certum- Prueba Rápida de Chikungunya IgG/IgM Cassette | Suero /Plasma/Sangre | 25 Piezas |

- Información exclusiva para profesionales de la salud, empresas, hospitales y/o clínicas.
- Material desarrollado por DIAGNOSE REACTIVOS
- Queda prohibida la reproducción parcial o total del material.
- El producto es fabricado por terceros y DIAGNOSE REACTIVOS actúa sólo como intermediario.