

PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTÍGENO NS1 DE ZIKA



PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTÍGENO NS1 DE ZIKA

ACERCA DE CERTUM

CERTUM es una marca que ofrece una amplia gama de kits de pruebas de diagnóstico innovadores que ayudan a brindar respuestas a los profesionales de la salud. Los productos CERTUM ofrecen precisión, simplicidad y velocidad para el diagnóstico temprano y el monitoreo de afecciones médicas comunes, incluyendo pruebas para la detección de drogas de abuso, embarazo, marcadores cardíacos, marcadores tumorales y pruebas de enfermedades infecciosas entre otros. Los productos de diagnóstico CERTUM se usan fuera del cuerpo humano y requieren poco o ningún equipo especial.

CERTUM tiene como misión mejorar el bienestar del paciente, reduciendo los costos y tiempos totales de los resultados de exámenes de diagnóstico, manteniendo la calidad y estándares altos esperados por los profesionales de la salud. CERTUM tiene una participación de mercado importante en hospitales, laboratorios de referencia, centros de investigación, consultorios médicos, servicios de salud ocupacional y programas de salud pública debido a su precisión, asequibilidad y facilidad de uso.

ACERCA DE LA PRUEBA


La prueba rápida Zika NS1 en cassette es un inmunoensayo cualitativo con base en una membrana que utiliza una combinación de partículas teñidas recubierta de anticuerpos para la detección del antígeno NS1 Zika en muestras de sangre entera, suero o plasma.

BENEFICIOS

- Rápida
- Eficiente, económica
- Fácil de utilizar
- No requiere equipo de laboratorio adicional
- Cuenta con aprobación de SSA



MODO DE EMPLEO

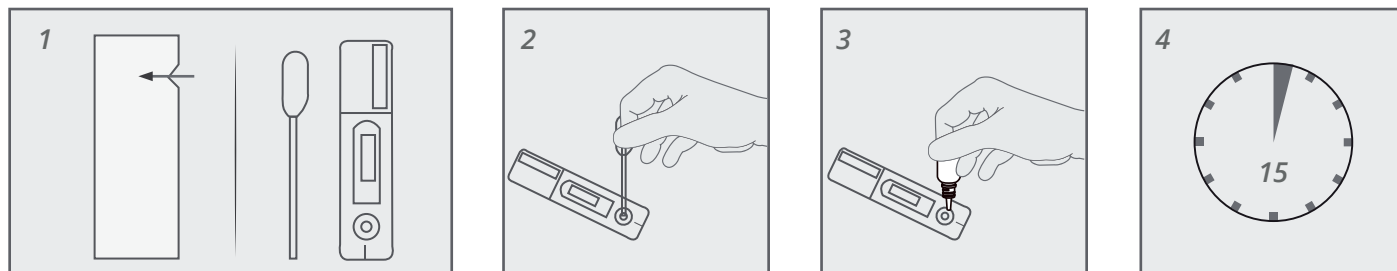

- 1.- Permita que el sobre alcance la temperatura ambiente antes de abrirlo.
- 2.- Suero o Plasma: Añada 25µl (1 gota) de la muestra de suero/plasma al pocillo de muestra. Sangre Entera: Añada 50µl (2 gotas) de la muestra de sangre entera al pocillo de muestra.
- 3.- Añada 80µl o 2-3 gotas del buffer en el pocillo de muestra.
- 4.- Espere que aparezcan las líneas teñidas. Lea los resultados a los 15 minutos. No interprete los resultados después de 20 minutos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Registro sanitario: 0761R2019 RSSA

Catálogo	Producto	Espécimen	Formato	Presentación
3501R069	Ag NSI	Suero /Plasma/Sangre	Cassette	10 pruebas/ kit

- Información exclusiva para profesionales de la salud, empresas, hospitales y/o clínicas.
- Material desarrollado por DIAGNOSE REACTIVOS
- Queda prohibida la reproducción parcial o total del material.
- El producto es fabricado por terceros y DIAGNOSE REACTIVOS actúa sólo como intermediario.