

PRUEBA RÁPIDA DE VIH DE CUARTA GENERACIÓN

Para el diagnóstico cualitativo de los anticuerpos tipo 1 y 2 del Virus de Inmunodeficiencia Humana y el antígeno p24 de tipo 1



ACERCA DE CERTUM

Certum® Diagnostics tiene como objetivo cubrir con un alto grado de satisfacción las necesidades de Hospitales, Laboratorios, Instituciones de Gobierno y Clínicas, que buscan ofrecer un diagnóstico rápido y acertado.



ACERCA DE LA PRUEBA

La Prueba Rápida en Cassette de VIH 1.2 y p24 en Combo (Sangre Entera/Suero/Plasma) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa del anticuerpo VIH tipo 1, del anticuerpo VIH tipo 2 y del antígeno p24 del VIH-1 en muestras de sangre entera, suero o plasma como auxiliar en el diagnóstico de la infección por VIH.


¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO P24?

La detección del antígeno p24 permite detectar de manera más oportuna la presencia del VIH en personas que adquirieron el virus de manera reciente.


NIVELES DE MARCADORES DE

- ANTÍGENO P24 DE VIH-1
- ANTICUERPOS DE VIH-1/2
- ARN DE PLASMA

*No es comparable con análisis moleculares

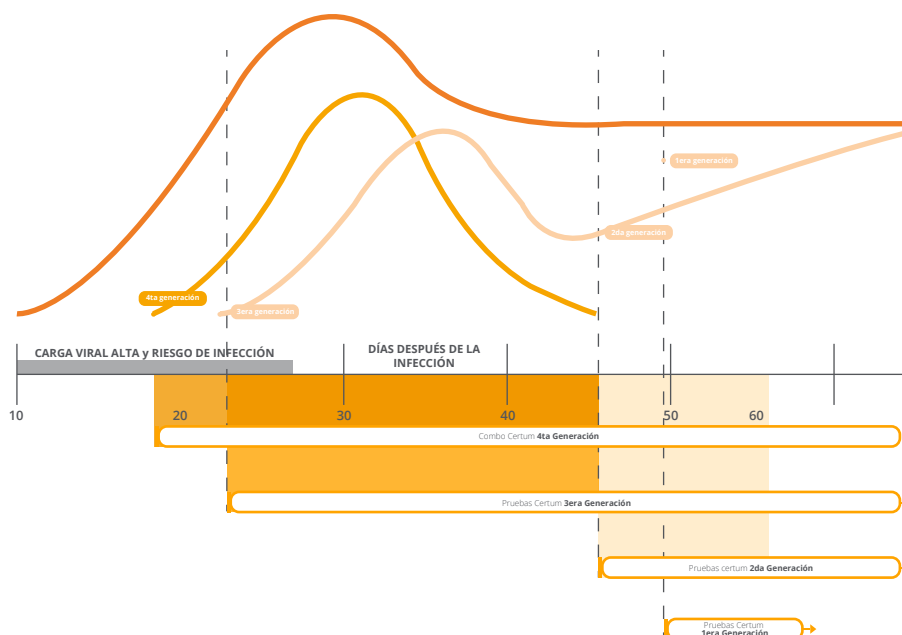

MODO DE EMPLEO

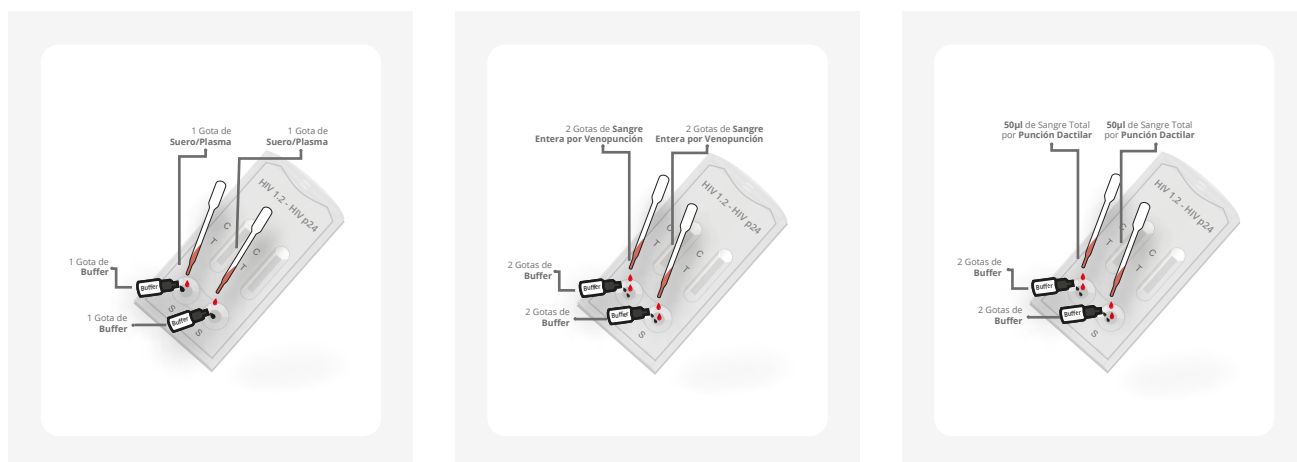


Coloque el cassette en una superficie limpia y plana.

1.- Suero o Plasma: Sostenga el gotero verticalmente y transfiera 1 gota de suero o plasma (aproximadamente 25 µL) al área de muestra, después agregue 1 gota de buffer (aproximadamente 40 µL) e inicie el temporizador.

2.- Sangre Entera por Venopunción: Sostenga el gotero verticalmente y transfiera 2 gotas de sangre entera (aproximadamente 50 µL) al área de muestra, después agregue 2 gotas de buffer (aproximadamente 80 µL) e inicie el temporizador.

3.- Sangre Entera por Punción Dactilar: Usando un tubo capilar: Llene el tubo capilar y transfiera aproximadamente 50 uL de muestra de sangre entera por punción dactilar al área de muestra del cassette de prueba, después agregue 2 gotas de buffer (aproximadamente 80 µL) e inicie el temporizador.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

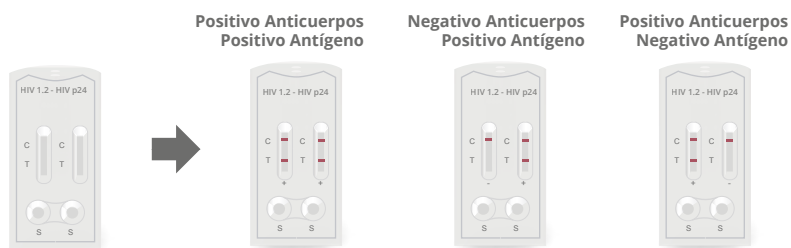

BENEFICIOS

- 1 Resultados en 10 minutos
- 2 Alta especificidad y sensibilidad
- 3 Detección cualitativa del anticuerpo VIH tipo 1, del anticuerpo VIH tipo 2 y del antígeno p24 del VIH-1

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

SKU	Producto	Contenido
3501R041	Certum - Prueba de HIV 1.2, HIV P24	25 pruebas

- Información exclusiva para profesionales de la salud, empresas, hospitales y/o clínicas.
- Material desarrollado por DIAGNOSE REACTIVOS
- Queda prohibida la reproducción parcial o total del material.
- El producto es fabricado por terceros y DIAGNOSE REACTIVOS actúa sólo como intermediario.