


PRUEBAS DE DROGAS CERTUM


Confianza y resultados rápidos en múltiples presentaciones



El Panel Multidrogas CERTUM le permite realizar exámenes para detectar desde 2 y hasta 6 drogas al instante. Para realizar la prueba, sólo es necesario insertar un extremo del dispositivo en la muestra de orina durante 3 segundos y esperar 5 minutos para ver los resultados para cada tipo de droga.


MODO DE EMPLEO

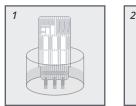

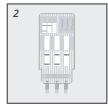

1.- Introduzca el panel en el frasco de orina. 2.- Lea los resultados después de 5 minutos.

INTERPRETACIÓN RESULTADOS

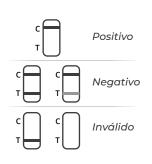




SPLIT SCREEN CUP

Registro sanitario: 0277R2018 SSA


El frasco de detección múltiple Split Screen Cup es el sistema más avanzado para determinar el consumo de drogas en la orina. Debido a que cuenta con un sistema de seguridad único, termómetro y panel de resultados montado de manera independiente, este frasco se encuentra notablemente por encima de cualquier opción.

MODO DE EMPLEO

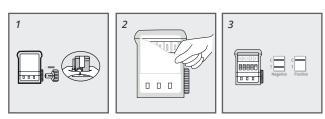

- 1.- Tome la llave de seguridad y empuje la llave dentro del orificio del recipiente para comenzar el test.
- 2.- Retirar la etiqueta donde aparecen los resultados.
- 3.- Después de 5 minutos, interprete los resultados.

INTERPRETACIÓN RESULTADOS

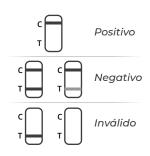



SIMPLE CUP

Registro sanitario: 0481R2018 SSA

El frasco de detección múltiple Certum Simple Cup es el sistema más avanzado para determinar el consumo de drogas en la orina. El Frasco de detección de múltiples drogas le ofrece un método rápido, sencillo y económico para realizar sus especímenes de detección de drogas.

MODO DE EMPLEO








- 1.- La muestra de orina deberá vaciarse directamente en el vaso de prueba.
- 2.- Desprenda la etiqueta del vaso de prueba para relevar el resultado.
- 3.- Después de recolectar la muestra, debe cerrar adecuadamente la tapa del vaso de prueba. Leer resultados en 5 minutos.


INTERPRETACIÓN RESULTADOS

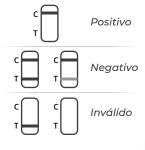



La prueba de drogas en tira es un formato sumamente económico y confiable para detectar el consumo de una droga en orina. Certum le ofrece una completa gama de pruebas rápidas para la de detección del consumo de drogas en orina. Nuestras pruebas le ofrecen la mayor confiabilidad, resultados rápidos y el método más práctico disponible. Todas nuestras pruebas de detección de drogas, cuentan con la aprobación de la FDA de los Estados Unidos y se someten a los puntos de corte establecidos por SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) y NIDA (National Institute for Drug Abuse).


MODO DE EMPLEO

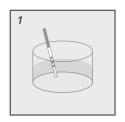



- 1.- Introduzca la tira a la muestra de orina por 10-15 segundos.
- 2.- Lea los resultados después de 5 minutos.

INTERPRETACIÓN RESULTADOS

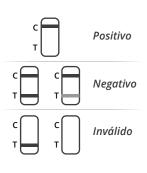



Registro sanitario: 0267R2018 SSA

CASSETTE

La prueba de drogas en cassette Certum es un formato asequible y confiable para un diagnóstico de drogas en orina. Nuestras pruebas brindan la mayor confiabilidad, resultados sumamente rápidos y el método más simple presente en el mercado. Ideal para un diagnóstico efectivo, confiable y económico.


MODO DE EMPLEO





- 1.- Deposite la muestra en el pocillo utilizando el gotero incluido.
- 2.- Lea los resultados después de 5 minutos.

INTERPRETACIÓN RESULTADOS

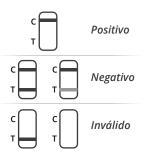



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Todos nuestros productos cumplen con el objetivo de ser rápidos.
- Fáciles de utilizar.
- Económicos.
- Confiables.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Catálogo	Formato	Parámetro	Contenido
3501R061	Panel	(COT/ETG)	25 pruebas
3502R006	Panel	(THC/COC/AMP)	25 pruebas
3502R017	Panel	(THC/COC/AMP/BAR/BZD)	25 pruebas
3502R007	Panel	(THC/COC/AMP/MET/OPI/BZD)	25 pruebas
3501R062	Panel	(THC/COC/AMP/MET/BAR/BZD)	25 pruebas
3501R005	Frasco Split Screen	(THC/COC/AMP/MET/OPI/PCP/BZO/BAR/MTD/MMDA)	25 pruebas
3501R003	Frasco Split Screen	(THC/COC/AMP/MET/OPI)	25 pruebas
3501R001	Frasco Split Screen	(THC/COC/AMP/BAR/BZO)	25 pruebas
3501R002	Frasco Split Screen	(THC/COC/AMP/PCP/OPI)	25 pruebas
3501R0622	Frasco Split Screen	(THC/COC/AMP/MET/OPI/PCP)	25 pruebas
3501R008	Frasco Split Screen	(THC/COC/AMP/MET/OPI/BZD)	25 pruebas
			25 pruebas

- Información exclusiva para profesionales de la salud, empresas, hospitales y/o clínicas.
 Material desarrollado por DIACNOSE REACTIVOS
 Queda prohibida la reproducción parcial o total del material.
 El producto es fabricado por terceros y DIAGNOSE REACTIVOS actúa sólo como intermediario.